

Preparación de LT8 (monopersulfato de potasio) para desinfección de laringoscoio

1. Colocarse guantes, camisolín, barbijo, antiparras.
2. Colocar en un recipiente de plástico tipo tapper 1 litro de agua segura.
3. Colocar 1 sobre de 5 gr de polvo activador.
4. Mezclar hasta que se disuelva el polvo.
5. Agregar 1 sobre “pouch activador” (1 sobre de 20 ml con líquido de color rojo).
6. Revolver hasta que la solución quede bien mezclada
7. Listo para usar.
8. La dilución preparada debe estar rotulada con fecha y hora.
9. Una vez diluida dura 24 horas.